


Tenon d'empreinte optique

ScanPost Stabyl®

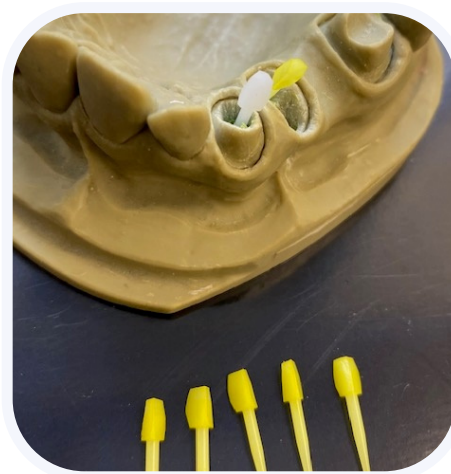

Une innovation exclusive Stabyl® :
qui garantit la réalité de la capture d'image
réalisée par l'empreinte de votre scanner,
permettant une parfaite reconstitution
par usinage de l'inlay-core.



Les seuls tenons d'empreinte optique capables de restituer précisément l'image optique, une exclusivité brevetée Stabyl® :

Tous les tenons Stabyl® sont fabriqués par usinage. Les tenons d'empreinte optique ScanPost offrent au Chirurgien-Dentiste la garantie d'une précision inégalée de l'image de l'empreinte optique, en garantissant la justesse de l'angulation de la racine et la profondeur d'enfoncement dans celle-ci pour obtenir la rétention mécanique de l'inlay-core, fabriqué en flux par la machine d'usinage du Prothésiste.

Caractéristiques :

Par leur fabrication par usinage de précision, les tenons d'empreinte optique ScanPost Stabyl®, avec leur conception originale et brevetée, permettent de positionner de façon sûre dans l'espace le futur inlay-core.

Tête de tenon
pour capture
optique

Pointe 120°



Conçu et Fabriqué en France - Manufacturé dans nos laboratoires - Marque et modèles déposés

Made in France - Made in our laboratories - Brand and models registered

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I.

These products are Class I medical devices.



Nos engagements environnementaux

Stabyl® revendique sa **responsabilité environnementale** et ses **valeurs éthiques** pour le bien-être de tous.

Stabyl® est un des rares fabricant **100% Français**, une fabrication **100% Rhône-Alpine** : notre approvisionnement en matières premières se fait dans un rayon de **100 Km autour de nos laboratoires**.

Notre fabrication est 100% locale, avec une **empreinte carbone extrêmement faible**, contrairement à beaucoup de produits importés de Chine, à la traçabilité douteuse.

Stabyl® est pleinement dans une **économie circulaire** et visant un **objectif de décarbonation maximale**, avec des produits 100% traçables, allant de la matière brute au produit fini.

Avantages

Complément à la gamme des Forêts et Tenons Radiculaires STABYL®

Utilisation des Forêts STABYL®

- Qualités de coupe reconnues
- Forage précis et sans stress
- Longévité exceptionnelle
- Non fragilisation de la racine
- Réalisation de reconstitutions coronaires avec ancrage radiculaire de hautes performances

Précision

- Portée conique régulière
- Rétention primaire remarquable
- Espace tampon en fond de cavité
- Qualité et précision d'usinage des tenons ScanPost

Pointe à 120°

- Mise en place optimisée

Repérage

- 1 - blanc / 2 - vert
- XS rose / X1 jaune / X2 bleu

Conception adaptée à tous les cas

- Les jeux fonctionnels réduits, prévus à la fabrication entre les forêts et les différents tenons utilisés (XS, X1, X2, n°1 ou n°2) donneront au praticien la possibilité de faire des

Reconstitutions Indirectes, avec un résultat optimum.


Domaines d'utilisation

Réalisations de reconstructions coronoradiculaires

Reconstitutions Indirectes :

Après forage avec le Forêt STABYL® correspondant à la taille choisie (N°1-blanc, N°2-vert, XS rose, X1 jaune ou X2 bleu), prendre l'empreinte optique avec le Tenon ScanPost (N°1-blanc, N°2-vert, XS rose, X1 jaune ou X2 bleu)*. Le montage du faux moignon se fera alors au laboratoire sur le Tenon ScanPost en situation sur le modèle. L'ensemble sera ensuite collé par le praticien.

** voir la documentation générale sur les Systèmes de Forêts et Tenons Radiculaires Stabyl®*

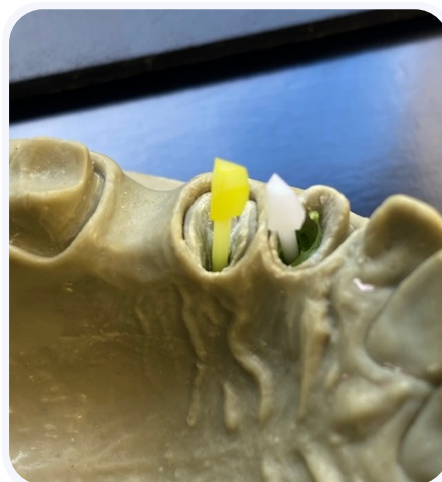

Formes

Les Tenons optiques ScanPost existent dans les formes cylindro-coniques cône court* :

- **XS rose** (Réf. : scanpost XS) (Ø : pointe 0,64 mm, cyl 1,28 mm)*
- **X1 jaune** (Réf. : scanpost X1) (Ø : pointe 0,64 mm, cyl 1,48 mm)*
- **X2 bleu** (Réf. : scanpost XS) (Ø : pointe 0,84 mm, cyl 1,66 mm)*

** dimensions moyennes pour chaque forme*

Également dans les formes cylindro-coniques* :

- **1 blanc** (Réf. : scanpost n°1) (Ø : pointe 0,64 mm, cyl 1,83 mm)*
- **2 vert** (Réf. : scanpost n°2) (Ø : pointe 0,84 mm, cyl 2,03 mm)*

** dimensions moyennes pour chaque forme*



Conception : Le Marketing Rochelais. Crédit photo : Fotolia, Stabyl®

Conditionnements

Coffret Séquenceur ScanPost : 1 Forêt, 1 mandrin manuel, 6 tenons optiques ScanPost

Recharges : Tenons optiques ScanPost : Boîte de 6